

## Allgemeines

Die hier beschriebene **Funk-Sensortaste** mit Funkadapter dient als einfaches Rufgerät für motorisch eingeschränkte Personen mit der besonderen Möglichkeit der Befestigung des Gerätes an der Bettdecke. Durch den fest angeschlossenen Funk-Adapter ist es zusammen mit einem passenden Funkempfänger zum Einsatz in Ackermann-Clino-Rufanlagen vorgesehen.



## Funktionsbeschreibung

Die Sensortaste besteht aus einer beweglichen Fläche, welche durch leichten Druck (seitlich oder in der Mitte) einen Ruf auslöst. Durch den in der Mitte integrierten Mikroschalter ist sowohl eine taktile als auch eine akustisch wahrnehmbare Rückmeldung des Auslösemechanismus gewährleistet. Der ausgelöste Ruf wird durch den fest angeschlossenen Funk-Adapter an einen Funkempfänger gesendet und dort angezeigt bzw. auf eine Rufanlage aufgeschaltet. Die Quittierung des Rufes erfolgt im Funk-Empfänger bzw. in der Rufanlage.

## Geräteansicht



- **Sensortaster:**
  - große Fläche D=83mm
  - geringe Auslösekraft <180g
- **Abnehmbarer Überzug:**
  - kann mit normaler Wäsche gereinigt werden
- **Funkadapter:**
  - fest angeschlossen
  - seitlich angebrachte Sende-LED dokumentiert den erfolgreichen Sendevorgang

## Hinweis:

Die im Funkadapter integrierte Batterie wird auf ihre Ladespannung hin überwacht. Eine schwächer werdende Batterie wird bei dem angeschlossenen Funkempfänger angezeigt, entweder als Text-Info (bei Taschen-Pager FE-099-504) oder als Störungs-Meldung (steckbarer Rufempfänger FE-099-142). Der Austausch der Batterie ist nur im Werk möglich. Die Lebensdauer beträgt mindestens 50.000 Rufe bzw. mindestens 5 Jahre.

## Technische Angaben:

Gehäuse:	Kunststoff, ABS, beige mit abnehmbarem Überzug aus Mikrofaser-Gewebe
Befestigung:	durch Sicherheitsnadel an Bettdecke bzw. auf Klettenfläche
empfindliche Fläche:	D=83mm
Auslösekraft / Hub:	max. 180g / Betätigungsweg 1,5mm
Rückmeldung:	taktil / akustisch bzw. durch LED im Funk-Adapter
Funkadapter:	Gehäuse Kunststoff, schwarz, Maße (LxBxH) 56x31x24mm mit roter Sende-LED (seitlich am Gehäuse)
Bestell-Bezeichnung:	<b>FS-099-242-00</b> passende Empfänger: <b>FE-099-142-01/02</b> (Empfänger zur Aufschaltung auf Clino-Rufanlage, <b>RS/AS</b> ) <b>FE-099-504-00</b> (Funk-Empfänger als Taschen-Pager mit Tonsignal)  <u>Alternativ (kabelgebunden, nur für Arbeitsstrom-Anlagen):</u> <b>TA-099-242-02</b> (Sensortaste fürs Bett mit Kabel, 2m mit 7-pol. Stecker für Clino-Rufanlage, <b>AS</b> ) <b>TA-099-242-65</b> (Sensortaste fürs Bett mit Kabel, 2m mit 6,3mm Klinken-Stecker für ELSO-Rufanlage, <b>AS</b> )  <u>Basis-Version:</u> <b>TA-099-242-35</b> (mit 3,5mm-Klinkenstecker, Mono, <b>AS</b> )

