

## Allgemeines

Die hier beschriebene **Frontplatten mit vertiefter Taste der Serie UU-888** dienen zur Vermeidung unbeabsichtigter Ruf-Auslösungen oder -Abstellungen bei Montage der Rufeinheit (z.B. 73075A) an der Wand (z.B. in der Nähe des Bettes). Sie sind direkt austauschbar mit den jeweiligen Standard-Versionen. Eine Bearbeitung der Rufeinheit ist dazu nicht erforderlich. Ihr Erscheinungsbild entspricht dem Clino-Design.

## Funktionsweise

Durch die vertiefte Montage sitzt die jeweilige Taste im montierten Zustand nahezu flächenbündig in der Frontplatte. Der Betätigungsweg ist so bemessen, daß eine flächige Berührung der Frontplatte keinen Ruf (bzw. Rufabstellung) auslöst (z.B. bei Berührung durch den Körper des schlafenden Patienten).

Erst ein gezieltes Betätigen der Ruftaste um mehr als 4mm löst den Ruf aus.





## Anwendungsbeispiel




Frontplatte in Rufeinheit 73075A montiert  
Taste betätigt →



## Verfügbare Ausführungen

| Frontplatte   | Beschreibung  | Anwendungs-Hinweise  |
|---|---|--|
| <br><b>UU-888-810-J3</b> | FRONTPLATTE RMG-FT<br>für Rufmodul 73073D3 bzw. 73075B, vertiefte Taste, rot, mit weißem "Rufsymbol", mit 2 Öffnungen für Nebensteckkontakte, 1 davon mit "Diagnostikalarm-Symbol"<br>Ausführung verkehrsweiß (ohne Rahmen)<br>→kompatibel zu Art.Nr. 88881J3 | Verhindert unabsichtliche Rufauslösungen beim Einstecken von Birntaster oder Diagnostikruf-Geräten (Patienten-Monitor)                         |
| <br><b>UU-888-810-G3</b> | FRONTPLATTE RT-FT *)<br>für Ruftaster-Einheit 73022A2, mit vertiefter Taste, rot, mit weißem "Rufsymbol",<br>Ausführung verkehrsweiß (ohne Rahmen)<br>→kompatibel zu Art.Nr. 88881G3  | Vermeidet Rufauslösungen, z.B. wenn die Rufeinheit ungünstig montiert wurde (TV-Gerät drückt an die Wand oder Bewohner lehnt sich an die Wand) |
| <br><b>UU-888-810-A3</b> | FRONT-PLATTE RE-FT<br>für Steck-Einheit 73022B, mit vertiefter Taste, rot, mit weißem "Rufsymbol",<br>mit 1 Öffnung für Nebensteckkontakt (seitlich)<br>Ausführung verkehrsweiß (ohne Rahmen)<br>→kompatibel zu Art.Nr. 88881A3                               | paßt für die alte Ruf-Einheit (z.B. in Arbeitsstrom-Anlagen), verhindert Rufauslösungen beim Einstecken des Birntasters                        |
| <br><b>UU-888-810-L3</b> | FRONTPLATTE RM-FT<br>für Rufmodul 73073E3 bzw. 73075A, mit vertiefter Taste, rot, mit weißem "Rufsymbol",<br>mit 1 Öffnung für Nebensteckkontakt (unterhalb)<br>Ausführung verkehrsweiß (ohne Rahmen)<br>→kompatibel zu Art.Nr. 88881L3                       | paßt für die neuen Rufeinheiten bzw. Rufmodul mit Bettenbus-Anschluß   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br><b>UU-888-810-H3</b>   | <p>FRONTPLATTE AT-FT *)<br/>für Abstelltaster 73642C, mit vertiefter Taste, grün<br/>Ausführung verkehrsweiß (ohne Rahmen)<br/>→kompatibel zu Art.Nr. 88881H3</p>  | <p>vermeidet unabsichtliche Rufabstellung durch den Bewohner/Patienten (z.B. im WC-Bereich)</p>   |
| <br><b>UU-888-810-D3</b>   | <p>FRONTPLATTE AR-FT<br/>für Arztruf-Einheit 73022A2, mit vertiefter Taste, blau,<br/>mit grauem "Arztrufsymbol" (oberhalb Taste)<br/>Ausführung verkehrsweiß (ohne Rahmen)<br/>→kompatibel zu Art.Nr. 88881D3</p>   | <p>Sehr wichtig bei Anlagen, in denen mit der Rufart „Arztruf“ gearbeitet wird. Hier sind unbeabsichtigte Auslösungen besonders kritisch zu werten!</p>                   |
| <br><b>UU-888-810-M3</b>   | <p>FRONTPLATTE QT-FT *)<br/>für Quittier-Einheit 73022A2, mit vertiefter Taste, gelb,<br/>Ausführung verkehrsweiß (ohne Rahmen)<br/>→kompatibel zu Art.Nr. 88881M3</p>   | <p>Geschützte Form für Anwesenheits-Markierung oder anderen Rufarten, welche mit einer gelben Taste ausgelöst werden sollen.</p>  |
| <br><b>UU-888-82L-A3</b>   | <p>FRONTPLATTE AE-FTL *)<br/>für Ruf-/Abstell-Einheit 73642B2,<br/>mit <b>vertiefter Taste links</b>, rot, mit "Rufsymbol",<br/>mit <b>normaler</b> Taste rechts, grün<br/>Ausführung verkehrsweiß (ohne Rahmen)<br/>→kompatibel zu Art.Nr. 88882A3</p>            | <p>Notwendig, wenn unabsichtliche Rufauslösung vermieden werden soll, wenn <u>nachts</u> Rufe abgestellt werden!</p>  |
| <br><b>UU-888-82R-A3</b>  | <p>FRONTPLATTE AE-FTR<br/>für Ruf-/Abstell-Einheit 73642B2,<br/>mit normaler Taste links, rot, mit "Rufsymbol",<br/>mit <b>vertiefter Taste rechts</b>, grün<br/>Ausführung verkehrsweiß (ohne Rahmen")<br/>→kompatibel zu Art.Nr. 88882A3</p>                     | <p>Diese Kombination ist vorteilhaft, wenn die Rufauslösung <u>leicht</u> erfolgen soll, die Rufabstellung jedoch nicht versehentlich gleich mit betätigt werden soll</p> |
| <br><b>UU-888-822-A3</b> | <p>FRONTPLATTE AE-FT<br/>für Ruf-/Abstell-Einheit 73642B2,<br/>mit <b>vertiefter Taste links</b>, rot, mit "Rufsymbol", und<br/>mit <b>vertiefter Taste rechts</b>, grün<br/>Ausführung verkehrsweiß (ohne Rahmen)<br/>→kompatibel zu Art.Nr. 88882A3</p>          | <p>Diese Version bietet allgemein Schutz vor beiden Fehlbedienungen (z.B. auch durch Möbel-Einrichtungen, welche zur Wand verschoben werden könnten)</p>                  |
| <br><b>UU-888-82L-A4</b> | <p>FRONTPLATTE ARE-FTL<br/>für Arztruf-/Abstell-Einheit 73642B2,<br/>mit <b>vertiefter Taste links</b>, blau, mit "Arztrufsymbol", und<br/>mit <b>normaler</b> Taste rechts, grün<br/>Ausführung verkehrsweiß (ohne Rahmen)<br/>→kompatibel zu Art.Nr. 88882A3</p> | <p>Dies ist eine Sonderversion, welche auf platzsparende Weise den Arztruf (vertiefter Taste!) mit der Rufabstellung zusammen in einer Einheit kombiniert.</p>            |

## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Frontplatten-Material:                   | PC-ABS-FR, verkehrsweiß (ähnl. RAL 9010)                                       |
| notwendiger Tasten-Hub bis Rufauslösung: | 4..6mm (je nach Montagesituation)  |
| Ausführung der Taste:                    | Flache Bauform mit verkürztem Lichtleiter,<br>Farbe und Bedruckung je nach Typ |
| Verpackungs-Einheit                      | VE=8   |
| Bestell-Bezeichnung:                     | <b>UU-888-.. (siehe rote Bezeichnung in der Liste)</b>                         |

\*) Artikel nur auf Anfrage lieferbar (Lieferzeit ca. 6-8 Wochen)